

Bauchliege



Bedienungsanleitung

Typ 60.002



04 / 2003



Prüf- und Zertifizierstelle
für Medizinprodukte GmbH
an der Technischen Universität
Berlin



Inhalt

| | |
|--|----------|
| 1. Vorwort | 3 |
| 2. Tipps für Ihre Sicherheit | 3 |
| 3. Konformitätserklärung | 3 |
| 4. Merkmale | 3 |
| 5. Einstellen - Anpassen | 3 |
| 6. Inbetriebnahme | 4 |
| 7. Wartung und Pflege | 4 |
| 8. Servicepartner | 5 |
| 9. Technische Daten | 6 |
| 10. Erweiterte Gewährleistungsbedingungen | 6 |
| <i>Notizen / Vermerke</i> | 7 |
| <i>Herstelleradresse</i> | 8 |
| <i>Seriennummer</i> | 8 |
| <i>Ihr zuständiger Fachhändler</i> | 8 |

1. Vorwort

Wir freuen uns, dass Sie sich für die Bauchliege entschieden haben. Das Produkt wurde Ihnen komplett montiert und fahrbereit geliefert.

Treten Fragen auf oder haben Sie Probleme wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

2. Tipps für Ihre Sicherheit

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zum Thema Sicherheit, Betrieb und Wartung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie diese für eine spätere Bezugnahme auf.

Die Bauchliege darf nur von sachkundigen und eingewiesenen Personen bedient werden.

Achten Sie darauf, dass Ihre Bauchliege nicht durch elektro magnetische Felder, wie durch tragbare Telefone oder andere Strahlungsquellen ausgesendet werden, beeinflusst werden kann.

Die maximale Zuladung darf 100kg nicht überschreiten.

Beachten Sie beim Überwinden von Hindernissen, dass diese nicht größer als 5cm sein sollten. Die Hindernisse sollten immer rechtwinklig angefahren werden um die Kippgefahr zu verringern.

Bedenken Sie auch, dass das Herauf- bzw. Herunterfahren von Hindernissen, wie Bordsteinkanten immer sehr vorsichtig erfolgen sollte. Legen Sie immer das Gurtsystem bei Benutzer an.

Zur Ihrer Sicherheit sollten Sie auf jegliche Fahrmanöver an ungünstigen Ebenen, deren Neigungswinkel größer als 6° sind, verzichten.

3. Konformitätserklärung

Richter Reha Technik GmbH erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, daß der Elektrorollstuhl Proton mit den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG übereinstimmt.

4. Merkmale

Die Bauchliege verbindet auf unkomplizierte Art und Weise die medizinischen Vorteile der Stehposition mit der aktiven Beweglichkeit des Benutzers.

Auf Wunsch kann die Bauchliege mit Gasfederverstellung oder mit Motorantrieb mit Notabsenkung bestellt werden (optional). In der Version mit Elektromotor haben Sie eine Rückzugsicherung und eine Notabsenkung serienmäßig eingebaut.

Zwei breite Gurtsysteme zur Fixierung des Patienten beim Aufstehvorgang.
Sicherung des Stehmobils mit Hilfe zweier Trommelbremsen.
Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

5. Einstellen - Anpassen

Vor der ersten Fahrt wird die Bauchliege auf Ihre persönlichen Bedürfnisse eingestellt. Ihr Fachhändler paßt dazu alle Funktionen auf Ihre Gegebenheit an.

6. Inbetriebnahme

Ein- und Aussteigen

Die Bauchliege muss beim Ein- und Aussteigen zu Ihrer Sicherheit immer nicht betätigt werden und die Bremsen sollten arretiert sein.

Wenn Sie eingestiegen sind können Sie Ihren Proton an der Ein-/ Austaste des Bedienfeldes einschalten.

Dabei leuchtet die grüne Lampe direkt unter dem Tastenfeld auf und die eingestellte Fahrstufe wird angezeigt. Blinkt die grüne Lampe, entschlüsseln Sie bitte den Blinkcode (siehe Seiten 9,10 u. 11) und rufen Sie ggf. den Kundendienst.

Änderungen, Neueinstellungen und Reparaturen an der Bauchliege, die nicht nach den vorgenannten Hinweisen zu beheben sind, dürfen nur vom Hersteller direkt oder in einer vom Hersteller autorisierten Werkstätte durchgeführt werden.

7. Wartung und Pflege

Was Sie viermal im Jahr und nach längeren Gebrauchspausen überprüfen müssen !

Elektronik

- alle elektrischen Leitungen sind nach Knick- und Scheuerstellen abzusuchen
- prüfen Sie den festen Sitz der Steckverbindungen.
- Elektronik und Steuermodule von Staub und Schmutz befreien. Keinesfalls mit Wasser abspritzen !!

Motor

- achten Sie auf unübliche Geräusche
- überprüfen Sie den Motor auf Undichtigkeit (Fettspuren).

Reifen

- suchen Sie die Reifen nach Beschädigungen ab und überprüfen Sie die Profiltiefe (min. 1 mm)

| | | |
|-----------|---------|---|
| Luftdruck | hinten: | Die Hinterreifen sind pannensicher ausgelegt. |
| | vorne: | Die Vorderräder sind pannensicherausgelegt. |

Sicherung

Die Steuerelektronik ist über eine eingebaute Automatiksicherung abgesichert. Die Sicherung arbeitet selbsttätig.

Was Sie jeden Abend machen sollten !

Batterie

-Batterie laden.

Zum Laden der Batterie, das Ladegerät an der Steuerelektronik anstecken. Das Ladegerät ist eingebaut.

Immer nur das eingebaute Ladegerät verwenden !

Reinigungshinweise

Reinigen Sie die Bauchliege mit Wasser oder Allzweckreiniger. Auf Scheuermittel, Aceton oder Spiritus sollten Sie verzichten, um ein Verkratzen bzw. Verstumpfen der Rahmen- und der Karosserieoberfläche zu vermeiden. Ebenso sollten Sie kein Dampfstrahlgerät zum Reinigen verwenden.

Aus sicherheitstechnischen Gründen empfehlen wir eine jährliche Inspektion durch einen autorisierten Fachmann. Dabei sollte die Bauchliege auf Verschleiß, Beschädigung und Funktionssicherheit geprüft werden.

8. Servicepartner

- ⇒ Wenden Sie sich bei Störungen Ihrer Bauchliege immer an Ihren Fachhändler. Ihr Fachhändler ist von uns geschult und kann Ihnen, auf Grund der räumlichen Nähe, kurzfristig helfen.
- ⇒ Lassen Sie sich auf der letzten Seite die Adresse Ihres Fachhändlers, die entsprechende Notrufnummer und den Namen des zuständigen Monteurs eintragen. Überprüfen Sie diese Angaben von Zeit zu Zeit.

Instandsetzung

Zur Durchführung von Instandsetzungsarbeiten wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre Fachwerkstatt. Sie ist in die Ausführung der Arbeiten kompetent und hat in der Regel geschultes Personal.

Service

Falls Sie Fragen haben sollten oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Richter-Fachhändler, der entsprechend unseren Richtlinien bei uns im Werk ausgebildet worden ist und Beratung, Service sowie Reparaturen übernehmen kann. Dadurch ist sichergestellt, dass Ihre Wünsche erfüllt werden.

Ersatzteile

sind nur über Ihren Fachhändler zu beziehen. Im Falle einer Reparatur verwenden Sie nur Original-Richter-Ersatzteile! Für eine korrekte Ersatzteil-Lieferung ist in jedem Fall die entsprechende Ident-Nr. (I-Nr.) des Produkts mit anzugeben! Diese finden Sie auf dem Typenschild.

Bei jeder Veränderung, die an der Bauchliege vorgenommen wird, sind vom Fachhändler die entsprechende Montageanleitung, sowie das Datum der Änderung der Bedienungsanleitung beizufügen.

So gibt es bei späteren Ersatzteilbestellungen keine falschen Bestellangaben.

9. Technische Daten

Maße und Gewichte:

| | |
|------------|------------------------------|
| Gasfeder: | 300 N |
| Motor: | 24 VDC |
| Räder: | R620/35 LA-GF-B. R140/40-1-V |
| Ladegerät: | intern 24V/0,8 A |
| Batterien: | wartungsfrei Typ WF 10-6 |

Zwei breite Gurtsysteme zur Fixierung des Patienten beim Aufstehvorgang.
Sicherung der Bauchliege mit Hilfe zweier Trommelbremsen.
Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

10. Erweiterte Gewährleistungsbedingungen

1. In Ergänzung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährt die Richter Reha Technik GmbH auf dieses Produkt eine Gewähr von 1 Jahr auf Fabrikations- oder Materialfehler (6 Monate für Batterien).
2. Unbrauchbare oder schadhafte Teile entsprechend 1. werden innerhalb der Gewährleistungsfrist unentgeltlich repariert oder ersetzt, wenn Richter Reha Technik unter Beifügung des Neukaufnachweises unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt wird. Die beanstandeten Artikel sind Richter Reha Technik porto- und frachtfrei einzusenden.
3. Ausgenommen sind Mängel, die aufgrund von Veränderungen und/ oder Instandsetzungsarbeiten aufgetreten sind, die unsere Vertragspartner oder Dritte ohne unser vorheriges schriftliches Einverständnis vorgenommen haben.
4. Weiter ausgeschlossen sind Mängel, die aufgrund natürlichen Verschleißes, übermäßiger Beanspruchung, gewaltsamer Beschädigung sowie nicht bestimmungsgemäßer Verwendung auftreten.
5. Die Gewährleistung erlischt, wenn bei Reparaturen keine original Richter Reha Technik Ersatzteile verwendet werden. Die Gewährleistung erlischt ebenfalls, wenn der Einbau der original Richter Reha Technik Ersatzteile oder konstruktive Veränderungen nicht durch einen von Richter Reha Technik autorisierten Fachhändler oder von Richter Reha Technik selbst vorgenommen werden.
6. Die im Rahmen der Gewährleistung zu ersetzenden Teile werden Eigentum von Richter Reha Technik.
7. Wandlungs- oder Minderungsanspruch besteht nur, wenn die Mängelbeseitigung oder Ersatzteillieferung abgelehnt oder unzumutbar verzögert wird oder fehlschlägt.



Notizen • Notizen • Notizen • Notizen

Ihr persönlicher Fachberater / Fachhändler :

Herstelleradresse

Richter Reha Technik GmbH
Am Hegnig 1
95349 Thurnau
Germany



hat folgende Seriennummer: